

## **Ceinture lombaire magnétique**

### **Le biomagnétisme pour vous soulager**

Notre ceinture lombaire magnétique est composée de 50 aimants thérapeutiques Néodyme en terres rares de 750 Gauss chacun, répartis sur l'avant et sur l'arrière de la celle-ci. Elle est en élasthanne et coton, souple, discrète et très efficace pour maintenir en douceur votre dos et vous apporter un confort quotidien dans la zone des lombaires.



**Principe** : L'action physiologique des aimants repose sur les principes du biomagnétisme qui est, selon le petit Robert, la sensibilité des êtres vivants aux champs magnétiques. Excellents anti-inflammatoires et antalgiques, les aimants calment les douleurs de types musculaires, articulaires ou rhumatismales. Notre ceinture lombaire est conçue pour que le champ magnétique crée par ses aimants enveloppe entièrement le bas de votre buste.



**Indications** : maux de dos, lumbago, sciatalgies, lombalgies mais aussi douleurs abdominales.



**Durée d'application** : Nous vous conseillons de la porter quotidiennement jusqu'à amélioration des douleurs. De quelques heures à plusieurs semaines. Cela dépend de l'intensité, de la profondeur et de l'ancienneté de la douleur et jusqu'à disparition de celle-ci. N'hésitez pas à la mettre préventivement afin d'éviter la survenue de fortes douleurs. Vous pouvez la porter le jour, la nuit ou 24 h sur 24 sans accoutumance, ni effets secondaires.



**Mode d'emploi** : Élastique et légère à porter elle se glissera sous vos vêtements sans vous gêner dans vos mouvements. Pour une bonne efficacité, posez la ceinture lombaire autour de votre taille ou sur vos hanches avec la série d'aimants qui se trouve au centre de la ceinture sur le milieu de votre dos et accrochez la grâce à sa bande velcro® sur votre ventre. Elle s'adaptera ainsi à votre morphologie sans problème.



**Les contres indications** : Les aimants et la thérapie magnétique sont interdits aux femmes enceintes et aux porteurs de stimulateurs cardiaques ainsi qu'aux personnes porteuses d'appareils susceptibles d'être déréglés par le magnétisme des aimants.



**Entretien** : Lavage à la main ou en machine programme laine (30° C). Pas d'essorage qui risquerait de casser les aimants. Séchage à l'air libre

**25 Aimants 750 Gauss à l'arrière** →

**25 Aimants 750 Gauss à l'avant** →

