

Aimants thérapeutiques Physiomag

Diamètre 5 mm - 12 mm - 23 mm

Le biomagnétisme pour vous soulager



Nos aimants Néodyme sont certifiés en terres rares. De qualité professionnelle dorée à l'or 24 carats. Ce sont les plus puissants et performants qui existent.

L'action physiologique des aimants repose sur les principes du biomagnétisme qui est, selon le petit Robert, la sensibilité des êtres vivants aux champs magnétiques. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est efficace et d'une simplicité extrême.



Principe : Excellents anti-inflammatoires et antalgiques, les aimants sous forme de pastilles calment les douleurs de types musculaires, articulaires ou rhumatismales. En effet, le sang comme tout conducteur en mouvement dans un champ voit se développer des micro courants induits qui ionisent les cellules nociceptives (capteurs de l'information douleur), stimulant la sécrétion d'endorphine, analgésique naturel du corps.



La magnétopuncture : selon les acupuncteurs-magnétothérapeutes, les aimants donnent des résultats comparables aux aiguilles d'acupuncture sans présenter leurs inconvénients : douleurs des piqûres, transmission éventuelle d'infections et hématomes. De plus, la zone couverte par un aimant est nettement plus étendue que celle d'une aiguille.



Indications : douleurs d'arthrite, d'arthrose, tennis-elbow, tendinites, foulures, torticolis, lumbago, contusions, ecchymoses, hématomes, œdèmes localisés, cervicalgies, sciatiques, raideurs dorsales, acupuncture magnétique, auriculothérapie par les aimants



Durée d'application : Les aimants peuvent être maintenus plusieurs jours ou semaines sur un même point. Les conserver jusqu'à un soulagement total.

La diminution de la douleur peut être immédiate (moins d'une heure) mais elle apparaît en général au bout de trois à cinq jours. On doit appliquer les aimants un minimum de trente minutes par jour à 24 heures sur 24 (le plus longtemps étant généralement le mieux) et ceci pendant 2 à 6 semaines ; prolonger l'utilisation des aimants quelques jours après la disparition des symptômes.

Si la douleur se déplace, appliquer un aimant supplémentaire sur le nouveau point douloureux, sinon déplacer celui qui est en place. Il est conseillé de décaler légèrement les aimants tous les 2 ou 3 jours pour éviter les irritations de la peau. Pour traiter une zone étendue, il est recommandé d'appliquer 2 à 4 aimants dès le début du traitement (et plus si la zone est très étendue). En cas de douleur profonde (ex. articulation du genou) il peut être nécessaire d'empiler 2 aimants, pour augmenter la portée du champ magnétique. La douleur peut croître au début du traitement, à cause de la mise en circulation de toxines. Il faut alors patienter 48 heures puis changer de pôle en cas de persistance de celle-ci.



Les contre indications : Les aimants sont interdits aux femmes enceintes et aux porteurs de stimulateurs cardiaques ainsi qu'aux personnes porteuses d'appareils susceptibles d'être déréglés par le magnétisme des aimants.

Ne pas utiliser les aimants de plus de 5 mm sur la partie haute de la tête, située au-dessus de la ligne formée par le bout du nez et le lobe de l'oreille car la grande densité magnétique des aimants pourrait causer de légers maux de tête. Au-dessus de cette ligne placer les aimants de 5 mm seulement.



Fixation : Les aimants s'appliquent à même la peau avec nos adhésifs spécifiques en fonction de leur taille.



Entretien : Les aimants Néodyme sont plaqués or afin de les rendre hypoallergéniques. Ils se nettoient à l'eau savonneuse ou avec de l'alcool médicinal.



Précautions : Les aimants ne supportent aucun choc . Il est important de ne pas les approcher les uns des autres ou d'objets métalliques car ils pourraient se casser (bris non couvert par la garantie). Ne pas les laisser à la portée des enfants qui pourraient les avaler. Leur usage est exclusivement externe. Les aimants de magnétothérapie ne doivent, si possible, pas être placés près d'appareils électriques ou électromagnétiques qui pourraient être endommagés par leurs puissants champs magnétiques.

L'utilisation des aimants thérapeutiques ne vous dispense pas de consulter votre médecin et ne se substitue pas à un traitement médical.




Application : Respecter un écart de 3 à 5 cm entre chaque aimant pour que les lignes de champ magnétique parcourent largement la zone à traiter.

- Utilisez préférentiellement les aimants de 5 mm pour le visage.
- Positionnez les aimants de 12 mm sur la mâchoire, le cou, les mains, les pieds et les bras selon l'intensité de vos douleurs.
- Fixez les aimants de 23 mm pour les douleurs plus profondes, sur les épaules, la nuque, le dos, les jambes, les genoux ou le sternum par exemple.

Pôle Nord contre la peau (repéré par une petite dépression centrale) : décontractant musculaire, vasodilatateur et «tonifiant»

Pôle Sud contre la peau (côté lisse) : anti-douleur, anti-inflammatoire, vasoconstricteur et «dispersant énergétique»

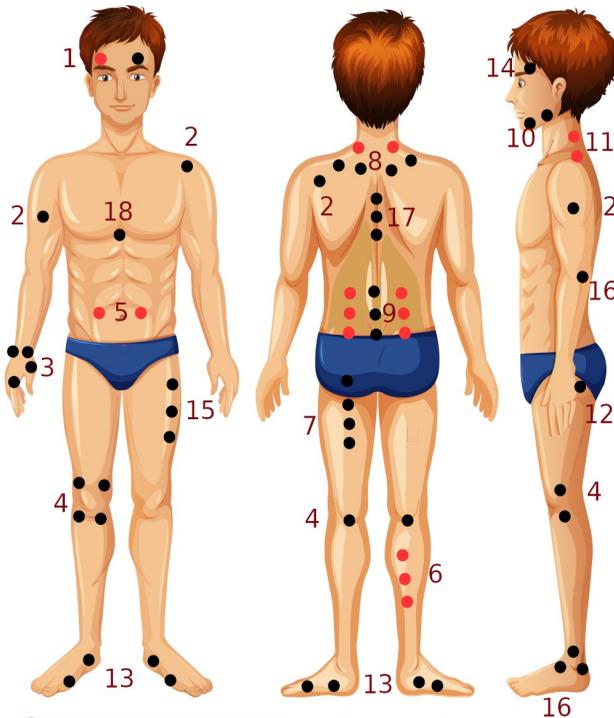

	Taille aimants en mm	Pathologies
1	5	Sommeil
2	5 12 23 50	Douleurs
3	5 12	Main, pouce, doigts, arthrose
4	5 12 23	Tendinite, arthrose, entorse
5	12 23	Inflammation intestins
6	12 23	Crampes
7	5 12 23	Sciatique
8	5 12	Douleurs, arthrose cervicale
9	5 12 23 50	Lumbago, lombalgies
10	5	Névralgie dentaire, douleurs dentaires
11	5 12	Torticolis
12	23 50	Douleurs hanche
13	5 12 23	Douleurs pieds, hallux valgus
14	5	Sinusite, maux de tête, céphalées
15	23 50	Hématome, ecchymose, bleu
16	5 12	Entorse, tendinite
17	5 12 23	Dorsalgie
18	5 12	Stress, nervosité, angoisse

● Aimant coté NORD contre la peau

● Aimant coté SUD contre la peau